

### 1. Przeznaczenie

- Ten produkt to kireta do łyżeczkowania zmian chorobowych tkanek w celu leczenia i analizy diagnostycznej
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku

### 2. Przeciwwskazania w stosowaniu

- Produkt do użytkowania wyłącznie przez profesjonalistów
- Zastosowanie dotyczące pacjentów**
- Nie należy stosować produktu u pacjentów, którzy są wrażliwi lub uczuleni na metal

### Zakazy dotyczące użytkowania


- Ponowne użycie zabronione, ze względu na właściwości użytkowe, brak możliwości ponownej sterylizacji, możliwe zakażenia
- Ponowna sterylizacja zabroniona

- Nie używać produktu, gdy stan aseptyczny produktów jest uważany za utracony z powodu uszkodzenia / zerwania opakowania

### Kształt i struktura

- Ten produkt jest jednorazowy, składa się z ostrza i uchwytu

### Wygląd zewnętrzny

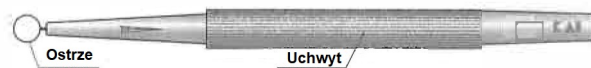

### Materiał

- Ostrze: Stal nierdzewna (zawiera nikiel i chrom)
- Rękojeść: Polipropylen

### 4. Obsługa i użytkowanie Przed użyciem

- Sprawdzić, czy na sterylizowanym pakiecie nie ma uszkodzeń, otworzyć pakiet i wyjąć produkt.
- Sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń / pęknięć produktu i używać go bez przerwy.

### Postępowanie i użycie

- Przycisnąć ostrze do tkanek objętych zabiegiem, wyłyżeczковать z odpowiednią siłą i odciąć tkanki.

### 5. Środki ostrożności przy stosowaniu

- Nie używać produktu, jeśli opakowanie jest uszkodzone / złamane (nie można zapewnić warunków aseptycznych, nawet jeśli produkt jest w okresie ważności)
- Jeśli ostrze wejdzie w kontakt z czymkolwiek innym, nie używać produktu i wymienić go na nowy
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, takie jak uszkodzenie / złamanie
- Ostrożnie obchodzić się z produktami, aby uniknąć zranienia przez ostrza (ostrze jest tak ostre, że może zranić)
- Zmienić sposób użycia produktów, być świadomym ryzyka infekcji i zutylizować je prawidłowo jako odpady medyczne w celu zapobiegania infekcjom

### 6. Przechowywanie i data ważności

- Unikaj wystawiania produktu na działanie wysokiej temperatury, wysokiej wilgotności, bezpośredniego światła słonecznego i wody
  - Przechowuj produkt w temperaturze otoczenia
  - Produkt należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, bez obciążania go czymkolwiek
  - Nie należy umieszczać produktu razem z produktami chemicznymi lub w miejscu, gdzie występuje gaz
  - Unikać uszkodzeń lub dziurkowania materiałów opakowania
- Data ważności**
- Sprawdź datę ważności, która jest podana na opakowaniu podstawowym i handlowym

CE 0197



Producent

Kai Industries Co., Ltd.  
1110, Oyana, Seki City, Gifu Prefecture, 501-3992, Japan

### Autoryzowany przedstawiciel [EC|REP]:

Kai Europe GmbH  
Kottendorfer StraBe 5  
42697 Solingen, Germany

### Dystrybutor w Polsce:

UNIBUY GMBH Sp. z o.o.  
ul. Chmielna 2/31  
00-020 Warszawa, Polska  
sklep@instrumedic.pl  
+48 737-488-443



Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone



Nie używać ponownie

[STERILE]

Sterylizacja promieniami Gamma



Przechowywać w suchym miejscu

Wersja 4, 2020-02-10

\* Jeśli potrzebna jest literatura dotycząca techniki łyżeczkowania skóry z użyciem produktu, prosimy o kontakt z dystrybutorem.

\* Każdy poważny incydent, który miał miejsce w związku z urządzeniem, należy zgłosić producentowi i właściwym organom.